



mobilomed[®] WIPES SYSTEM

wiederbefüllbares Spendersystem | einfache Handhabung | sehr wirtschaftlich





BEFÜLLUNG DER mobilomed[®] WIPES VLIESTUCHSPENDER

Zum Arbeitsschutz sowie zum Schutz der Vliesrolle vor Kontamination sind Schutzkittel und Handschuhe anzuziehen.

1. Die Vliesrolle in den Spendereimer stellen und dabei den Anfang der Rolle ein kleines Stück aus der Mitte herausziehen.
2. Die Anwendungslösung langsam spiralförmig von der Mitte nach Außen über die Vliesrolle geben. Stimmen Sie die Menge der Anwenderlösung auf die Größe der verwendeten Vliesrolle ab. 90 Tücher = 2,5 Liter
3. Spenderaufsatz anbringen. Das erste Tuch durch die Entnahmeöffnung herausziehen und verwerfen.
4. Deckel fest verschließen.
5. Mitgeliefertes Etikett beschriften und auf den Deckel kleben.

Nach ca. 30 Minuten ist die Vliesrolle vollständig durchtränkt und einsatzbereit. Der Ansatz ist 28 Tage verwendbar. Bei sichtbarer Verschmutzung oder möglicher Kontamination ist die Lösung früher auszutauschen.

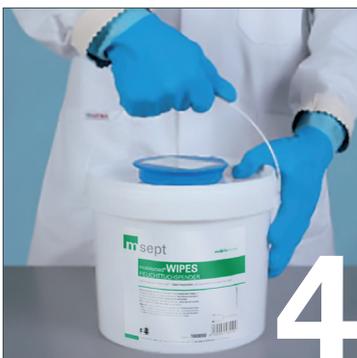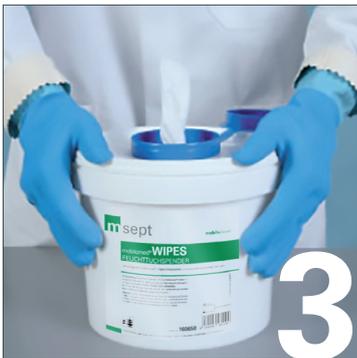

AUFBEREITUNG

MANUELLE AUFBEREITUNG

1. Flüssigkeitsreste und mögliche Reste der Vliesrolle vollständig entsorgen.
2. Spendereimer inkl. Deckelsystem mit heißem Wasser gründlich aus- bzw. abspülen. Spendersystem vollständig abtrocknen lassen.
3. Mit Desinfektionsmittelgetränkten Tüchern das Spendersystem desinfizieren, besonders im Bereich des Deckels und der Entnahmeöffnung. Alle Flächen müssen vollständig benetzt sein. Unbedingt die Einwirkzeit beachten.
4. Ist das Desinfektionsmittel auf allen Oberflächen abgetrocknet, kann das System mit einer neuen Vliesrolle und frisch angesetzter Anwendungslösung befüllt werden.

MASCHINELLE AUFBEREITUNG

1. Flüssigkeitsreste und mögliche Reste der Vliesrolle vollständig entsorgen.
2. Die Aufbereitung ausschließlich in professionellen Maschinen durchführen.
3. Programmwahl: 60°C und eine Haltezeit von 5 Minuten Aufbereitung kann mit mildalkalischen / hochalkalischen oder ohne Einsatz eines Reinigers erfolgen.
4. Nach Programmende und vollständiger Abtrocknung, kann das System mit einer neuen Vliesrolle und frisch angesetzter Anwendungslösung befüllt werden.



Bitte beachten Sie die Krinko-Empfehlungen zur sporiziden Aufbereitung zum Beispiel mit Manisept Oxi (Art. 278441/301522).

mobilomed® WIPES SYSTEM

wiederbefüllbares Spendersystem | einfache Handhabung | sehr wirtschaftlich

Unsere trockenen Wischtücher zur Tränkung mit Desinfektionsmitteln sind zur schnellen und unkomplizierten Desinfektion und Reinigung von Flächen und Medizinprodukten geeignet. Sie geben die Desinfektionslösung hervorragend ab und gewährleisten eine einwandfreie Benetzung der zu desinfizierenden Fläche.

mobilomed Wipes können aus einem eigens dafür konzipierten Vliestuchspender entnommen werden.

Inhalt **160651** Vliestuchrolle 90 Tücher (32 x 30 cm) **160650** Spendereimer ohne Befüllung.



mobiloclean® PRODUKTEMPFEHLUNG



mobilomed® MANISEPT OXI

mineralische Flächendesinfektion

ohne Kennzeichnung | ohne chemische Zusätze | beseitigt 99,99% der Bakterien | Wirksamkeit getestet

Manisept Oxi ist eine gebrauchsfertige Lösung für die Flächendesinfektion. Für die Aufbereitung von Wipes-Spendereimern gemäß der Krinko-Empfehlung geeignet. Manisept Oxi zerfällt nach der Benutzung in seine harmlosen Ausgangsstoffe Wasser und Mineralsalz. Bakterizid, fungizid, iruzid, sporizid, geruchshemmend. EN14476, EN14347, EN1040 (2005), EN1275 (2005). Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. BAuA-Reg.: N-107916

Inhalt **301522** 100 ml **278441** 750 ml



mobilomed® MINOSEPT

Konzentrat zur Flächendesinfektion

gute Reinigungskraft | aldehyd- und phenolfrei | angenehmer Geruch | für Acrylglas geeignet | NORO wirksam

Minosept ist ein Desinfektionsmittelkonzentrat für die Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. Minosept wirkt auf der Basis von quartären Ammoniumverbindungen und enthält keine Aldehyde und Phenole. Es zeichnet sich durch eine gute Reinigungskraft, einen angenehmen Geruch und einen effektiven Korrosionsschutz aus. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. BAuA-Reg.: 72960

Inhalt **116270** 1 Liter **116271** 5 Liter



mobilomed® QUICKSEPT PUR

Alkoholische Schnelldesinfektion

schnell wirksam ab 30 Sekunden | parfüm- und aldehydfrei | rückstandsfrei | besonders für Allergiker geeignet | NORO wirksam

Quicksept Pur ist zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art. Quicksept Pur ist eine aldehydfreie Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol. Quicksept Pur ist parfüm- und rückstandsfrei und weist somit eine gute Hautverträglichkeit auf. Es ist besonders für Allergiker und hautempfindliche Personen geeignet. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. BAuA-Reg.: N-74178

Inhalt **180926** 500 ml **180927** 1 Liter **180928** 5 Liter