

## mobilomed msept Quicksept Pur

### Gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion

- parfümfrei
- aldehydfrei
- begrenzt viruzid PLUS



**Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion zur wirksamen und schnellen Desinfektion von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art.**

## ANWENDUNGSBEREICHE

### **Vor Gebrauch Etikett lesen!**

Gem. Medizinprodukteverordnung (MDR): Zur Desinfektion und Reinigung von nicht invasiven, alkoholbeständigen Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung: Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar und Flächen aller Art. Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung besonders für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet.

## ANWENDUNG

Die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten. Quicksept Pur kann als Wischdesinfektion oder mit einer Sprühapplikation verwendet werden.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Einsatz im Vliestuchspendersystem: Quicksept Pur eignet sich insbesondere zur Verwendung in Vliestuchspendersystemen mit einer begutachteten Desinfektionsleistung und einer Standzeit von bis zu 28 Tagen in Kombination mit den Wipes.

# Quicksept Pur

## WIRKUNGSSPEKTRUM und EINWIRKZEITEN

(Gebrauchsfertige Lösung! Nicht verdünnen!)

bakterizid, levurozid	5 min
mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	1 min
Begrenzt viruzid	1 min
Begrenzt viruzid PLUS	5 min
Wirksam gegen Noroviren (MNV)	5 min
Wirksam gegen Adenoviren	5 min

## ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten: 45,0 g Ethanol

Materialverträglichkeit: Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen:  
Polymethylmethacrylat (PMMA) und Polyethyleneterephthalat (PET).

## LIEFERFORMEN

Artikelnummer	Inhalt	Flasche	VPE
180926	500ml	Flasche	20 x 500ml
180927	1 Liter	Euroflasche	12 x 1 Liter
180928	5 Liter	Kanister	3 x 5L

# Quicksept Pur

## GUTACHTEN UND ZERTIFIKATE

Vollumfänglich begutachtet.

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH. DVG-gelistet.  
Registriert als Biozid-Produkt bei der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)  
gem. Biozidgesetz: BAuA Reg. - Nr. N-74178

## BESONDERE HINWEISE

Nicht bei alkoholempfindlichen Flächen wie beispielsweise Acrylglas anwenden. Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polymethylmethacrylat (PMMA) und Polyethyleneterephthalat (PET).

## KENNZEICHNUNG GEMÄß GEFAHRSTOFFVERORDNUNG

**Achtung** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf/Aerosol nicht einatmen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Piktogramm gemäß SDB



Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gem. nationaler Richtlinien.

## DATEN ZUR UMWELT

Alle Behältnisse und Verschlüsse bestehen aus Polyethylen (HDPE). Die Behältnisse und Verschlüsse der Kanister sind entsprechend gekennzeichnet, um eine sortenreine Trennung und eine optimale Wiederverwertbarkeit zu ermöglichen.

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Stand der Informationen 10/2023