

mobilomed msept

Quicksept Pur Wipes

- Alkoholische, parfümfreie Tücher zur Schnelldesinfektion von empfindlichen Oberflächen
- Auch für Touchscreens & Displays* geeignet
- Vliestuch zu 100 % biologisch abbaubar und zu 100 % plastik- & mikroplastikfrei
- Wirksam gegen Noroviren (MNV)
- Begrenzt viruzid PLUS

ANWENDUNGSBEREICHE

Gemäß EU-Medizinprodukte-Verordnung: Schnelldesinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten, insbesondere auch für empfindliche Flächen von Medizinprodukten.

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR):

Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art, vorwiegend in patientennahe Umgebung.

ANWENDUNG

Flächen mit Quicksept Pur Wipes bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

ZUSAMMENSETZUNG

100 g Tränklösung enthalten als wirksamen Bestandteil: 45 g Ethanol

LIEFERFORM

Größe	Artikel-Nr.
Mobilomed Quicksept Pur Wipes 100 Blatt (20 x 20 cm)	309224

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion:

Bakterizid, levurozid gem. VAH/EN 16615:	2 min
mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	1 min
Tuberkulozid (M. terrae)	30 sek
Begrenzt viruzid gemäß EN 14476	1 min
Begrenzt viruzid PLUS gemäß EN 14476	3 min
Ergänzende Prüfergebnisse:	
Wirksam gegen Noroviren (MNV) gem. EN 14476	30 sek
Wirksam gegen Rotaviren gem. EN 14476	30 sek
Wirksam gegen Adenoviren gem. EN 14476	3 min

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT:

Die Anwendung von Quicksept Pur Wipes wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA).

KENNZEICHNUNG GEMÄß GEFÄHRSTOFFVERORDNUNG

ACHTUNG Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.



DATEN ZUR UMWELT

Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.
Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

HALTBARKEIT NACH ANBRUCH:

42 Tage

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Hersteller:

Dr. Schumacher GmbH · Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · GERMANY · Tel. +49 5664 9496-0 www.schumacher-online.com